

EXTRAKTIONSPUFFERRÖHRCHEN

EINWEGTUPFER

TESTKASSETTE

6 SCHRITTE ANLEITUNG ZUM ANTIGEN-SELBSTTEST


POSITIV?

DIE SCHULLEITUNG INFORMIERT 1450 ODER
DIE ÖRTLICHE GESUNDHEITSBEHÖRDE.

NEGATIV?


HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH, GESUND BLEIBEN
UND WEITER DIE SCHULE BESUCHEN!

1

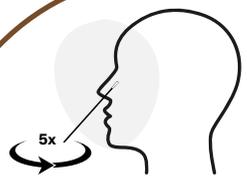


- Tupfer ca. 2,5 Zentimeter in ein Nasenloch einführen
- Das Stäbchen 5 Mal drehen, dabei sanft gegen die Schleimhaut pressen
- Vorgang im anderen Nasenloch wiederholen

2

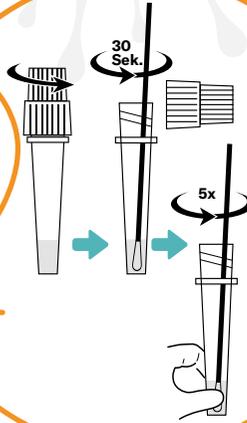

- Rörchen mit Pufferlösung aufschrauben, ohne es zu drücken
- Das Stäbchen einführen und 30 Sekunden umrühren
- Rörchen zusammendrücken und währenddessen das Stäbchen mindestens 5 Mal drehen
- Aufpassen, dass Flüssigkeit nicht aus dem Rörchen spritzt!

3

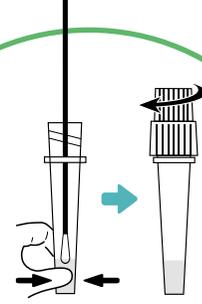

- Stäbchen entnehmen und dabei Rörchen zusammendrücken
- Kappe mit Tropferspitze fest aufdrehen
- Rörchen wirbeln und schütteln

4



- Testkassette aus der Verpackung nehmen und flach auf den Tisch legen
- Kappe von der Tropferspitze abdrehen
- Rörchen vorsichtig zusammendrücken und 4 Tropfen auf Testkassette tropfen (Vertiefung S)

WICHTIG:
Die Testkassette reagiert nach dem Auftropfen der Testflüssigkeit sensibel auf Bewegung. Um das Testergebnis nicht zu verfälschen, darf sie daher nicht gedreht, geschüttelt oder bspw. von einem Raum in den anderen getragen werden.


5



- 15 Minuten warten
- Das Ergebnis ablesen

6

Ergebnisinterpretation

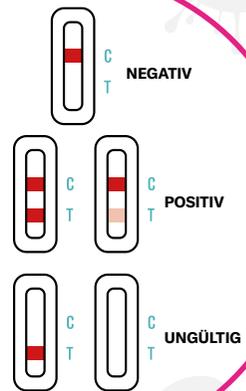

- NEGATIV
- POSITIV
- UNGÜLTIG